


DISPOSITIVO CORTANTE DESCARTÁVEL EAKIN



Corte ascendente de 45°
graus (ponta delicada)

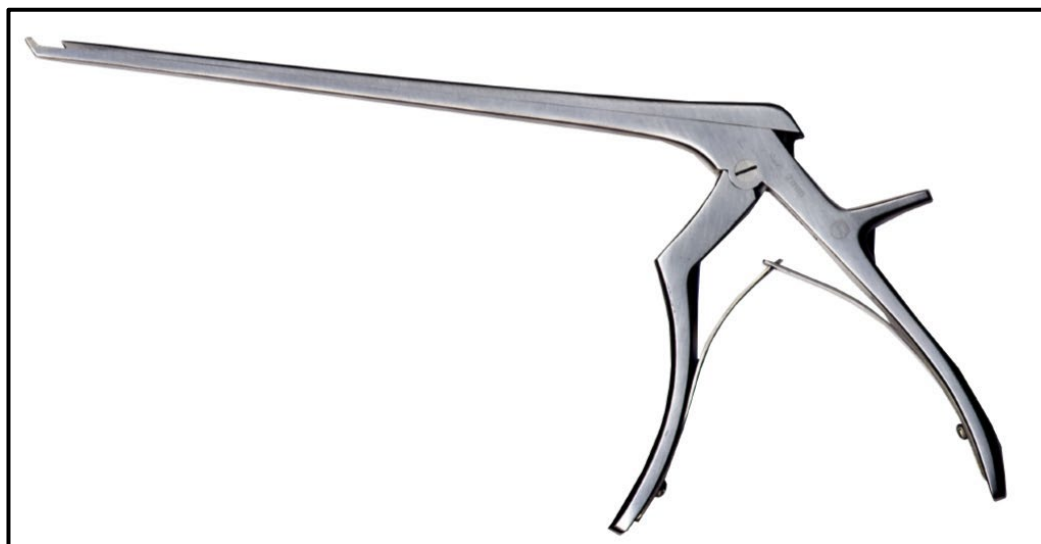

Corte ascendente de 45°
graus



90° graus

INDICAÇÕES

O Dispositivo cortante descartável é utilizado para cortar ou extrair tecidos duros, especialmente ossos. Para utilização na população em geral.

MODO DE USO

- Inspeccionar todas as embalagens esterilizadas antes de utilizar e descartar o dispositivo se a barreira estéril estiver quebrada ou danificada.
- Inspeccionar o rótulo para informação sobre o prazo de validade.
- Remover o dispositivo utilizando técnicas estéreis.
- Não é necessária a montagem do dispositivo.
- Inspeccionar o dispositivo antes da utilização. Os dispositivos danificados devem ser notificados ao fabricante e não devem ser utilizados. Os artigos danificados não utilizados devem ser devolvidos ao fabricante.
- Após o procedimento, eliminar o dispositivo em conformidade com as diretrizes hospitalares.



INSTRUÇÕES DE USO

CONTRAINDICAÇÕES

Não se destina a utilização no sistema nervoso central ou no sistema circulatório central.

EFEITOS ADVERSOS

Não tem efeitos adversos.

AVISOS

Produto estéril. Inspecionar todas as embalagens esterilizadas antes de utilizar e eliminar o dispositivo se a barreira esterilizada estiver quebrada ou danificada.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Não utilizar o dispositivo se estiver danificado.

O fabricante recomenda uso único.

PRECAUÇÕES

- Para utilização por profissionais médicos com formação num ambiente cirúrgico com equipamento apropriado.
- Utilizar com cautela em conjunto com fontes de calor ou lasers para evitar lesões na equipe cirúrgica ou no paciente.
- Não se destina a utilização em conjunto com tratamentos magnéticos (RM).

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Armazenar e transportar em local seco, sem a luz direta do Sol e em temperatura ambiente

**FABRICANTE RECOMENDA USO
ÚNICO**

VALIDADE: 5 ANOS

PRODUTO ESTÉRIL

**ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE
ETILENO**

Fabricante Legal:

Detentor do Registro:

Canada Central de Negócios do Brasil Ltda.

Av. Francisco Silveira Bitencourt nº 1369 – Pavilhão 27, sala 01 –
2º andar - Sarandi - Porto Alegre / RS - CEP: 91150-010
CNPJ: 01.911.022/0001-76

Resp. Técnico: Carla Sturm Trindade - CRF/RS 4709

Notificação ANVISA 80003890158